



Universelle abklappbare Bettseitensicherung Termigea h23058

Bettgitter für Senioren, gefertigt aus weiß lackiertem Stahlrohr. Ausgestattet mit Klemmhalterung, verstellbar mittels Rändelschrauben.

Grundmaße: 165 x 40 cm.

Universelle einzelne Fallschutzbettseite, geeignet für Pflege- und Standardbetten, sowohl Einzel- als auch Doppelbetten. Die Struktur besteht aus weiß lackiertem Stahlrohr. Das Seitengitter ist mit einer Klemmhalterung ausgestattet, die über zwei Rändelschrauben verstellbar ist und die Montage an Bettgestellen mit einem Profil von mindestens 1,8 cm bis maximal 4,5 cm ermöglicht. Ein innenliegender Drehknopf in der Langlochführung erlaubt die Ausrichtung zum Kopf- oder Fußende des Patienten und ermöglicht außerdem, die Bettseite vollständig abzuklappen, ohne sie demontieren zu müssen.

Technische Merkmale:

- Material: Weiß lackiertes Stahlrohr, Ø 2,54 cm
- Abklappmechanismus: 180° abklappbar
- Verstellung: Ausrichtung zum Kopf- oder Fußende des Patienten über Drehknöpfe
- Grundmaße: 165 x 40 cm
- Gewicht: 6,8 kg
- Konformität: Entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang I der Richtlinie 93/42/EWG, geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG, wie in Anhang VII der Richtlinie 93/42/EWG und deren nachfolgenden Änderungen vorgeschrieben.

Installation und Gebrauch

Entfernen Sie die Schrauben mit den Befestigungsgriffen an der Basis der Klemmen. Stellen Sie die verbleibenden Befestigungsschrauben an den Klemmen entsprechend der Struktur des Bettes ein. Setzen Sie das Seitengitter mit beiden Klemmen auf den Bettrahmen. Bringen Sie die zuvor entfernten Schrauben mit den Befestigungsgriffen wieder an. Richten Sie das Seitengitter in Bezug auf das Bett aus und ziehen Sie die Befestigungsgriffe an den Klemmen gleichmäßig fest.

Die Verstell- und Klappgriffe ermöglichen – wenn sie gelockert werden – das Verschieben der Bettseite in Richtung Fuß- oder Kopfende des Patienten innerhalb des durch die Langlöcher vorgegebenen Bereichs. Nach der Einstellung müssen die Griffe wieder festgezogen werden. Werden die Verstell- und Klappgriffe so weit gelockert, dass die Langlöcher vollständig freigegeben werden, kann das Seitengitter um 180° abgeklappt werden, was jegliche Art von Pflegemanöver am Bett oder Patienten ermöglicht. Nach Abschluss der Tätigkeiten muss das Seitengitter wieder in seine Ausgangsposition gebracht und die Griffe erneut fest angezogen werden.

- **Garantie 1 Jahr**