



Rollstuhl für Duschen aus Aluminium h8914

Duschrollstuhl mit weißem, korrosionsbeständigem Aluminiumrahmen und 4 5"-Rädern. Soft pur Sitzbreite 45 cm. Tragfähigkeit 150 kg

Ein Duschrollstuhl, ideal zum Duschen im Sitzen für alle Menschen mit extrem eingeschränkter Mobilität. Der korrosionsbeständige Aluminiumrahmen garantiert Langlebigkeit und der Sitz, die Rückenlehne und die Fußstützen aus weichem Polyurethan verhindern Druckstellen.

Er ist mit 4 gebremsten 5"-Rollen ausgestattet und verfügt über einen Toiletteneimer mit Deckel, so dass er sowohl als Duschstuhl als auch als Toilettenrollstuhl verwendet werden kann. Die Fußstützen sind abnehmbar und verstellbar und die Sitzhöhe ist einstellbar.

Technisches Datenblatt:

- weiß behandelter Aluminiumrahmen
- 4 gebremste 5"-Räder
- Sitz, Rückenlehne und Fußstütze aus weichem Polyurethan
- abnehmbare und verstellbare Fußstützen
- Sitzbreite 45 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Sitzhöhe 50 - 55 cm einstellbar
- max. überwindbare Höhe (WC) 42 - 47 cm verstellbar
- Gesamtbreite (mit Armlehnen) 56 cm
- Gesamttiefe 93 cm
- Gesamthöhe 96 - 101 cm einstellbar
- max. Belastbarkeit 150 kg
- Gewicht 12,90 kg
- CE-Kennzeichnung (entspricht der Richtlinie 93/42/EWG vom 14. Juni 1993, Anhang I, über Medizinprodukte)
- Garantie 2 Jahre

Neigung der Armlehnen

- diese Funktion kann dem Benutzer das Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl erleichtern
- beim Duschen ermöglicht das Herunterklappen der Armlehnen auch eine bessere Körperhygiene während der Benutzung
Lassen Sie den Rollstuhl mit heruntergeklappten Armlehnen niemals unbeaufsichtigt

- um die Armlehnen zurück zu klappen, heben Sie sie an der Vorderseite an
- um die Armlehnen wieder in die richtige Position zu bringen, klappen Sie sie nach vorne, indem Sie auf den vorderen Teil drücken

Einstellen der Fußstützen auf die gewünschte Höhe

- die Höhe der Fußstützen des Rollstuhls muss auf den Benutzer eingestellt werden
- Die Höhe ist richtig eingestellt, wenn die Oberschenkel des Benutzers beim Sitzen richtig auf dem Sitz und die Füße auf den Fußstützen aufliegen.
- Um die Höhe der Fußstützen einzustellen, nehmen Sie sie vom Rollstuhl ab.
- Entfernen Sie die Befestigungsschraube und stellen Sie die Höhe der Fußstützen durch Einsetzen oder Entfernen des Innenrohrs ein.
- Setzen Sie die Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie fest.

Einstellung der Sitzhöhe

- die Sitzhöhe muss an den Benutzer angepasst werden und ist richtig eingestellt, wenn der sitzende Benutzer seine Füße regelmäßig auf dem Boden abstützt
- Stellen Sie die Sitzhöhe nur ein, wenn der Rollstuhl leer ist.
- zur Höheneinstellung den Clip greifen und herausziehen
- stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Höhe ein
- Stecken Sie den Clip in die dafür vorgesehene Öffnung
- stellen Sie immer alle Teleskoprohre auf dieselbe Höhe ein
- Nehmen Sie keine Einstellungen vor, während der Rollstuhl in Gebrauch ist!

INFORMATIONEN

- **Höhe** einstellbar
- **Breite** 56 cm
- **Tiefe** 93 cm
- **Tragfähigkeit** 130 kg
- **Material** Aluminium



Rollstuhl für Duschen aus Aluminium h8914

Höhe: regulabile

Breite: 56 cm

Tiefe: 93 cm

Tragfähigkeit: 150 g

Material: Aluminium