



Komfortabler Aluminium-Duschrollstuhl h8915

Duschrollstuhl mit korrosionsbeständigem weißem Aluminiumrahmen, 4 Lenkrollen und abnehmbarer Fußstütze. Sitzbreite 50 cm. Tragfähigkeit 150 kg

Ein Rollstuhl, der sowohl als Duschstuhl als auch als Toilettenrollstuhl verwendet werden kann. Er hat einen korrosionsbeständigen, weiß behandelten Aluminiumrahmen und ist mit 4 Lenkrollen, einem Toiletteneimer mit Deckel und abnehmbaren Fußstützen ausgestattet. Der höhenverstellbare Sitz und die Rückenlehne sind aus weichem Polyurethan gefertigt, um Druckstellen zu vermeiden.

Technisches Datenblatt:

- weiß behandelter Aluminiumrahmen
- 4 gebremste und schwenkbare 5"-Rollen
- Sitz, Rückenlehne und Fußstütze aus weichem Polyurethan
- abnehmbare und verstellbare Fußstützen
- Toiletteneimer mit Deckel
- Sitzbreite 50 cm
- Sitztiefe 43 cm
- Sitzhöhe 50 - 55 cm verstellbar
- max. Höhe (WC) 42 - 47 cm verstellbar
- Gesamtbreite (mit Armlehnen) 61 cm
- Gesamttiefe 93 cm
- Gesamthöhe 96 - 101 cm verstellbar
- max. Belastbarkeit 150 kg
- Gewicht 13,50 kg
- CE-Kennzeichnung (entspricht der Richtlinie 93/42/EWG vom 14. Juni 1993, Anhang I, über Medizinprodukte)
- Garantie 2 Jahre

Neigung der Armlehnen

- diese Funktion kann dem Benutzer das Ein- und Aussteigen aus dem Rollstuhl erleichtern
- beim Duschen ermöglicht das Herunterklappen der Armlehnen auch eine bessere Körperhygiene während der Benutzung
Lassen Sie den Rollstuhl mit heruntergeklappten Armlehnen niemals unbeaufsichtigt
- um die Armlehnen zurück zu klappen, heben Sie sie an der Vorderseite an
- um die Armlehnen wieder in die richtige Position zu bringen, klappen Sie sie nach vorne, indem Sie auf den vorderen Teil drücken

Einstellen der Fußstützen auf die gewünschte Höhe

- die Höhe der Fußstützen des Rollstuhls muss auf den Benutzer eingestellt werden
- Die Höhe ist richtig eingestellt, wenn die Oberschenkel des Benutzers beim Sitzen richtig auf dem Sitz und die Füße auf den Fußstützen aufliegen.
- Um die Höhe der Fußstützen einzustellen, nehmen Sie sie vom Rollstuhl ab.
- Entfernen Sie die Befestigungsschraube und stellen Sie die Höhe der Fußstützen durch Einsetzen oder Entfernen des Innenrohrs ein.
- Setzen Sie die Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie fest.

Einstellen der Sitzhöhe

- die Sitzhöhe muss an den Benutzer angepasst werden und ist richtig eingestellt, wenn der sitzende Benutzer seine Füße regelmäßig auf den Boden stellt
- Stellen Sie die Sitzhöhe nur im leeren Zustand des Rollstuhls ein
- zur Höheneinstellung den Clip greifen und herausziehen
- stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Höhe ein
- Stecken Sie den Clip in die dafür vorgesehene Öffnung
- stellen Sie immer alle Teleskoprohre auf dieselbe Höhe ein
- Nehmen Sie keine Einstellungen vor, während der Rollstuhl in Gebrauch ist!

INFORMATIONEN

- **Höhe** einstellbar
- **Breite** 61 cm
- **Tiefe** 93 cm
- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Material** Aluminium

Komfortabler Aluminium-Duschrollstuhl h8915



Komfortabler Aluminium-Duschrollstuhl h891

Höhe: regulierbar

Breite: 61 cm

Tiefe: 93 cm

Tragfähigkeit: 150 kg

Material: Aluminium